



使い方

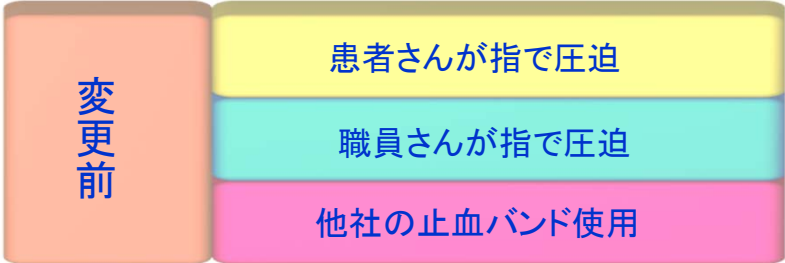

患者さんに合ったスポンジの厚さを決めて、ご使用ください。

	患者Aさんに合った圧迫は？			
		動脈側	適度(弱)	適度(中)
	静脈側	適度(弱)	適度(中)	適度(強)
	スポンジの厚さ (目安)	約 4mm (2分の1)	約 3mm (3分の1)	約 2mm (4分の1)

※ スキルの確認をお願い致します。

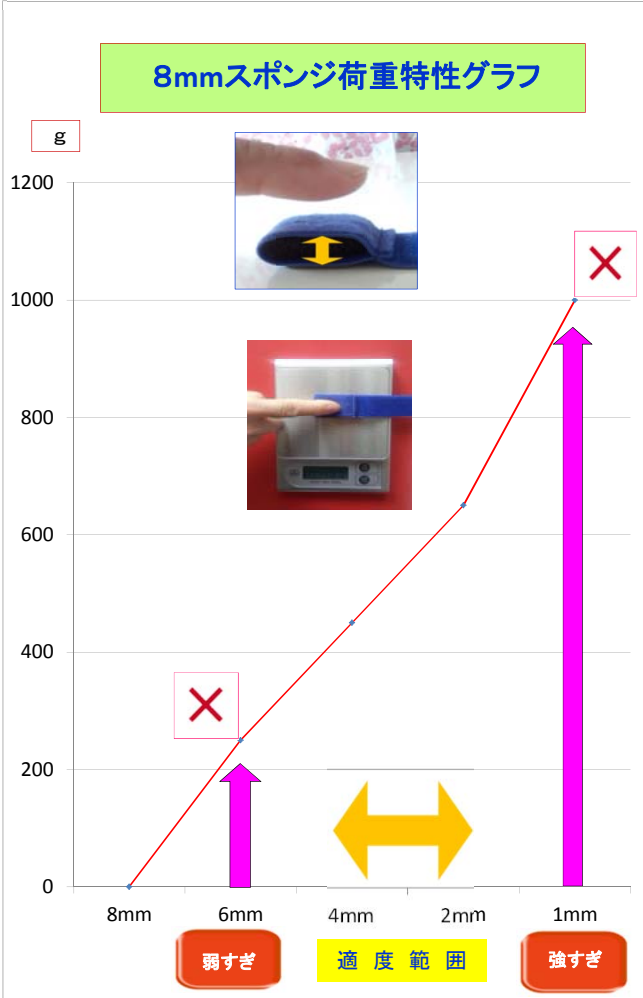

特許出願中



サイズ	目安
	使用位置の腕回り
L (380mm)	260mm以下
M (340mm)	220mm以下
S (300mm)	180mm以下

※ 適度範囲で止血して頂く事で、止血トラブルの減少にお役に立てれば幸いです。